




Technische Daten / Technical information

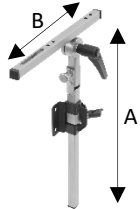


D 1 4 040 R	
D 1 4 040 L	
A=	40,0 cm
B=	15,0 cm
L=	10,0/ 6,1 cm

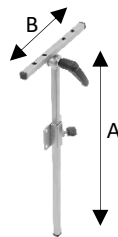

D 1 4 050	
A=	31,0 cm
B=	15,0 cm
L=	10,0/ 5,0 cm

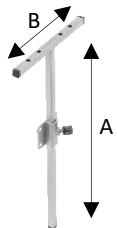

D 1 4 060	
A=	29,0 cm
B=	15,0 cm
L=	10,0/ 5,0 cm

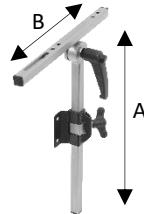

D 1 4 070 300 R	
D 1 4 070 300 L	
A=	30,0 cm
B=	24,0 cm
L=	10,0/ 20,5 cm

A= Höhe, B= Auflagefläche, L= Lochabstand
A= Height, B= Support surface, L= Hole spacing

Lieferumfang/ Delivery includes

D 1 4 040 / D 1 4 070

1 x Unihalter D 1 4 032 / Universal Clamp
4 x Innensechskantschrauben M 6 x 12 / Inner Allen Screws
4 x U-Scheibe für M6 / Washer for M6
4 x Flachmutter M6 / Flatnut M6

D 1 4 050 / D 1 4 060

1 x Unihalter D 1 4 038 / Universal Clamp
4 x Innensechskantschrauben M 6 x 12 / Inner Allen Screws
4 x U-Scheibe für M6 / Washer for M6
4 x Flachmutter M6 / Flatnut M6


Alle Rechte vorbehalten, besonders die der Verbreitung und Vervielfältigung, auch auszugsweise.
All rights reserved.

Version: 24.08.2020

Gebrauchsanweisung/ Instruction Sheet



Armlehnenhalterung / Armrest Hardware

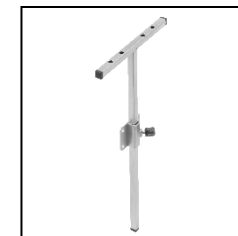

Inhalt/Content:

Armlehnenhalterung, abklappbar, mit Konusgelenk, rechts Armrest Bracket, swing away, with coned joint, right	D 1 4 040 R E 1 4 040 R	☐
Armlehnenhalterung, abklappbar, mit Konusgelenk, links Armrest Bracket, swing away, with coned joint, left	D 1 4 040 L E 1 4 040 L	☐
Armlehnenhalterung, Edelstahl, mit Konusgelenk, mini Armrest Bracket, stainless steel, with coned joint, mini	D 1 4 050 E 1 4 050	☐
Armlehnenhalterung, Edelstahl, T-Stück, mini Armrest Bracket with coned joint, stainless steel, mini	D 1 4 060 E 1 4 060	☐
Armlehnenhalterung, Edelstahl, mit Konusgelenk, 300 mm Armrest Bracket with coned joint, stainless steel, 300 mm	D 1 4 070 300R E 1 4 070 300R	☐
Armlehnenhalterung, Edelstahl, mit Konusgelenk, 300 mm Armrest Bracket with coned joint, stainless steel, 300 mm	D 1 4 070 300L E 1 4 070 300L	☐

Charge Nr./No.:



Datum/Date:

Kontrolliert/controlled:

Zu Ihrer Sicherheit

Um Gefahren und Unfälle zu vermeiden, lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen strikt.

Anwendung

Die Armlehnenhalterungen werden an die Außenschale der Sitzschale montiert.
Alle Halterungen haben Höhenverstellung.
Einige Modelle (D 1 4 030) sind mit verstellbarem Neigungswinkel ausgestattet.
Bei starker Beanspruchung sind die Verstärkungsbleche mit zu verwenden (D 1 2 400).
Die Montage erfolgt auf der Innenseite des Alurahmens, zusammen mit dem von außen angebrachten Unihalter.

Individuelle Anpassung und Montage

Bei der Montage ist zu beachten, dass die Halterung nicht an andere Anbauteile anstößt.
Zur besseren Positionierung sollte die spätere Armlehne montiert sein.
Die Montage erfolgt mit dem mitgelieferten Schraubenset.

Pflege und Wartung

Alle Armlehnenhalterungen können mit milder Seife, Schwamm und Wasser gereinigt werden.

EU-Konformitätserklärung

Wir, McLean REHatechnik GmbH, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Produkte die grundlegenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) erfüllen.

Safety Notes

To reduce risk, please ensure that the instructions have been read and fully understood before use.
The assembly instructions must be strictly adhered to.

Application

The Armrest Hardware should be mounted to the sides of the seat frame.
All the hardware brackets are height adjustable.
Some models (E 1 4 030) are also angle adjustable.
Where heavy loading is expected Strengthening Bars (E 1 2 400) should be used in conjunction with the McLean Aluminium Frame.

Assembly and Fitting

During assembly care should be taken that the Armrest Hardware does not obstruct the wheels or other assemblies especially when tilting.
Assembly should be carried out with the screw set supplied.

Care and Maintenance

This pelvic harness is a positioning aid. It is not a safety belt.

EU Declaration of Conformity

We, McLean REHatechnik GmbH, declare under our sole responsibility that the products described in these operating instructions meet the basic requirements of the regulation (EU) 2017/745 (MDR).