




Technische Daten / Technical information

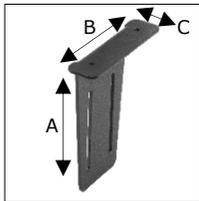


D 1 4 010	
A=	19,0 cm
B=	15,0 cm
C=	4,0 cm
L=	10,0 cm

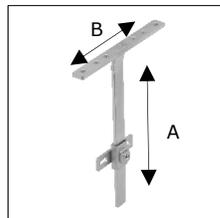

D 1 4 011	
A=	15,0 cm
B=	20,0 cm

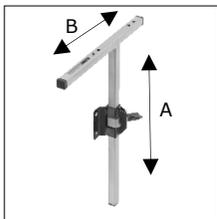

D 1 4 020	
A=	30,0 cm
B=	24,0 cm
L=	10,0 – 20,5 cm

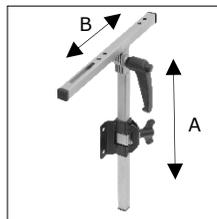

D 1 4 030=300 R/L	
A=	30,0 cm
B=	24,0 cm
L=	10,0 – 20,5 cm

A= Höhe, B= Auflagefläche, C= Breite der Auflage, L= Lochabstand
 A= Height, B= Support surface, C= Width of support surface, L= Hole spacing

Lieferumfang/ Delivery includes

D 1 4 010 / D 1 4 011

2 x Innensechskantschrauben M6 x 12/ Inner Allen Screws
 2 x U-Scheibe für M6/ Washer for M6
 2 x Flachmutter M6/ Flatnut M6

D 1 4 020 / D 1 4 030

4 x Innensechskantschrauben M 6 x 12/ Inner Allen Screws
 4 x U-Scheibe für M6/ Washer for M6
 4 x Flachmutter M6/ Flatnut M6
 1x Unihalter D 1 4 032/ Universal Clamp E 1 4 032


Alle Rechte vorbehalten, besonders die der Verbreitung und Vervielfältigung, auch auszugsweise.
 All rights reserved.

Version: 14.08.2020

Gebrauchsanweisung/ Instruction Sheet



Armlehnenhalterung / Armrest Hardware

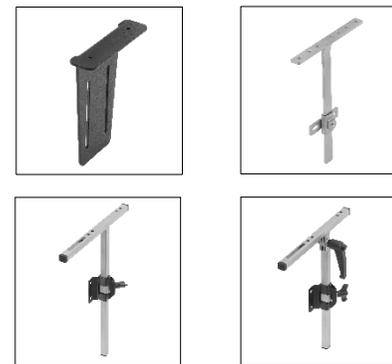

Inhalt/Content:

Armlehnenhalterungsplatte Armrest Mounting Plate	D 1 4 010 E 1 4 010	<input type="checkbox"/>
Armlehnenhalterung, flach, mit Zubehör Armrest Bracket, flat, with accessories	D 1 4 011 E 1 4 011	<input type="checkbox"/>
Armlehnenhalterungsrohr Armrest Hardware Tube	D 1 4 020 E 1 4 020	<input type="checkbox"/>
Armlehnenhalterungsrohr, Edelstahl, mit Lamellengelenk, 300mm, rechts Armrest Hardware Tube, stainless steel, with slats joint, 300mm, right	D 1 4 030=300 R E 1 4 030=300 R	<input type="checkbox"/>
Armlehnenhalterungsrohr, Edelstahl, mit Lamellengelenk, 300mm, links Armrest Hardware Tube, stainless steel, with slats joint, 300mm, left	D 1 4 030=300 L E 1 4 030=300 L	<input type="checkbox"/>

Charge Nr./No.:

Datum/Date:



Kontrolliert/controlled:

Zu Ihrer Sicherheit

Um Gefahren und Unfälle zu vermeiden, lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen strikt.

Anwendung

Die Armlehnenhalterungen werden an die Außenschale der Sitzschale montiert.
Alle Halterungen haben Höhenverstellung.
Einige Modelle (D 1 4 030) sind mit verstellbarem Neigungswinkel ausgestattet.
Bei starker Beanspruchung sind die Verstärkungsbleche mit zu verwenden (D 1 2 400).
Die Montage erfolgt auf der Innenseite des Alurahmens, zusammen mit dem von außen angebrachten Unihalter.

Individuelle Anpassung und Montage

Bei der Montage ist zu beachten, dass die Halterung nicht an andere Anbauteile anstößt.
Zur besseren Positionierung sollte die spätere Armlehne montiert sein.
Die Montage erfolgt mit dem mitgeliefertem Schraubenset.

Pflege und Wartung

Alle Armlehnenhalterungen können mit milder Seife, Schwamm und Wasser gereinigt werden.

EU-Konformitätserklärung

Wir, McLean REHatechnik GmbH, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Produkte die grundlegenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) erfüllen.

Safety Notes

To reduce risk, please ensure that the instructions have been read and fully understood before use. The assembly instructions must be strictly adhered to.

Application

The Armrest Hardware should be mounted to the sides of the seat frame.
All the hardware brackets are height adjustable.
Some models (E 1 4 030) are also angle adjustable.
Where heavy loading is expected Strengthening Bars (E 1 2 400) should be used in conjunction with the McLean Aluminium Frame.

Assembly and Fitting

During assembly care should be taken that the Armrest Hardware does not obstruct the wheels or other assemblies especially when tilting.
Assembly should be carried out with the screw set supplied.

Care and Maintenance

This pelvic harness is a positioning aid. It is not a safety belt.

EU Declaration of Conformity

We, McLean REHatechnik GmbH, declare under our sole responsibility that the products described in these operating instructions meet the basic requirements of the regulation (EU) 2017/745 (MDR).