


Technische Daten / Technical information



D 1 4 210*	
A=	35,0 cm
B=	12,0 cm
L=	150 mm



D 1 4 300R=1 *	
D 1 4 300L=1 *	
A=	30,5 cm
B=	11,0 cm
C=	6,0 cm
L=	50 mm * 5

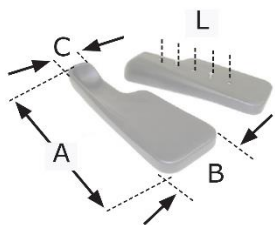

D 1 4 300R=2 *	
D 1 4 300L=2 *	
A=	40 cm
B=	13,5 cm
C=	8,0 cm
L=	50 mm * 5

A= Höhe, B= Auflagefläche, L= Lochabstand
A= Height, B= Support surface, L= Hole spacing

Lieferumfang/ Delivery includes

2x Flachrundschräube Innensechskant/ Flat Round Allen Screw Inner Allen M 6 x 25

Alle Rechte vorbehalten, besonders die der Verbreitung und Vervielfältigung, auch auszugsweise.
All rights reserved.

Version: 17.08.2020

Gebrauchsanweisung/ Instruction Sheet

Armlehnenpolster / Armrests



Inhalt/Content:

Armlehnen, flach, breit
Armrests, channel form

D 1 4 210
E 1 4 210

☐

Armlehnen, schalenförmig, mit Handauflage, Gr. 1, rechts
Armrests, channel-shaped, with hand support, size 1, right

D 1 4 300R=1
E 1 4 300R=1

☐

Armlehnen, schalenförmig, mit Handauflage, Gr. 1, links
Armrests, channel-shaped, with hand support, size 1, left

D 1 4 300L=1
E 1 4 300L=1

☐

Armlehnen, schalenförmig, mit Handauflage, Gr. 2, rechts
Armrests, channel-shaped, with hand support, size 2, right

D 1 4 300R=2
E 1 4 300R=2

☐

Armlehnen, schalenförmig, mit Handauflage, Gr. 2, links
Armrests, channel-shaped, with hand support, size 2, left

D 1 4 300L=2
E 1 4 300L=2

☐

Charge Nr./No.:



Datum/Date:

Kontrolliert/controlled:

Zu Ihrer Sicherheit

Um Gefahren und Unfälle zu vermeiden, lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen strikt.

Anwendung

Die Armlehnen werden zur Armführung und Lagerung eingesetzt.

Individuelle Anpassung und Montage

Alle Armlehnen werden mit den dafür eingelassenen Gewindeeinsätzen auf eine vorgesehene Halterung geschraubt.
Einige Modelle (D 1 4 300) können an den Einkerbungen gekürzt werden.
Anschließendes Entgraten nicht vergessen.

Pflege und Wartung

Alle Armlehnhalterungen können mit milder Seife, Schwamm und Wasser gereinigt werden.

EU-Konformitätserklärung

Wir, McLean REHatechnik GmbH, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Produkte die grundlegenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) erfüllen.

Safety Notes

To reduce risk, please ensure that the instructions have been read and fully understood before use. The assembly instructions must be strictly adhered to.

Application

The Armrest acts as a support and guide for the arm.

Assembly and Fitting

All the Armrests are fitted with screw thread inserts for mounting to the brackets.
Some models (E 1 4 300) may be trimmed up to the grooved trimlines.
All sharp edges should be deburred.

Care and Maintenance

All Armrest pads may be cleaned with mild soap or detergents using warm water.

EU Declaration of Conformity

We, McLean REHatechnik GmbH, declare under our sole responsibility that the products described in these operating instructions meet the basic requirements of the regulation (EU) 2017/745 (MDR).